

HIZLI AÇILAN YAY DESTEKLİ DOBBS BAR Model QDCB Küçük ve Normal

Kullanım Endikasyonları:

Çocuğunuzun ayağı düzeltildikten sonra, Dobbs Bar ayak abdüksiyon ateli ayağı düzeltilmiş konumda tutarak ayağın tekrar eski hâline dönmesini önler.

NOT: Bu ateli asla düzeltilmemiş bir ayakta kullanmayın. Atel çarpık ayağı düzeltmez; yalnızca Ponseti Yöntemi (çarpık ayağı yavaş yavaş düzeltmek için bir dizi seri alçı kullanılan bir yöntem) ile elde edilen düzeltmenin korunmasını sağlar.

Kullanım Talimatları:

Dobbs Bar ilk 3 ay günde 23 saat, sonrasında ise 2 ila 4 yıl boyunca geceleri ve uyku vakitlerinde giyilmelidir. Atel kullanımı, çarpık ayağın düzeltilmiş hâlinin korunmasında kritik öneme sahiptir. Atel belirtilen şekilde giyilmezse, yüzde 100'e yakın oranda nüksetme görülür.

Uyarılar ve önlemler:

Dobbs Bar'daki vidalarda asla Loctite veya başka benzer süper yapıştırıcı bazlı diş tutucular kullanmayın. Süper yapıştırıcı/Loctite, polikarbonat plastikte tepkimeye girerek plastiğin zayıflamasına ve kırılmasına neden olur.

Dobbs Bar'ın Kurulumu

Çubuk genişliğinin ayarlanması:

Dobbs Bar, çubuğun genişliği çocuğun omuz genişliğine eşit olacak şekilde ayarlanmalıdır. Çocuğun omuz genişliğini sol omzunun dışından sağ olzunun dışına kadar ölçün. Dobbs Bar uzunluğunu, çubuğun uzunluğu soldaki ayak tabanı plakasının topuk ortasından sağdaki ayak tabanı plakasının topuk ortasına kadar olan mesafe çocuğun omuz genişliği ölçümünüze eşit olacak şekilde ayarlayın. Çubuğun omuz genişliğinden biraz daha geniş olması, çok dar olmasından daha iyidir. Çubuk uzunluğunun çok dar olması çocuk için rahatsızlık yaratır.

Paket içeriğinde mevcut olan altıgen anahtarını kullanarak orta kıskaç üzerindeki altıgen başlı vidaları gevşetin ve çubukların genişliğini çocuğun omuz genişliğine eşit olana dek kaydırarak açın. Doğru genişliğe ulaştığınızda, altıgen başlı vidaları yeniden sıkarak çubukların sıkıca sabitlenmesini sağlayın.

Dış rotasyonun ayarlanması:

Etkilenen ayak veya çarpık ayak 60 derece dışa dönük olacak şekilde; etkilenmeyen taraf ise 30 derece dışa dönük olacak şekilde ayarlanmalıdır. Çift taraflı çarpık ayaklar için her iki ayak da 60 derece dışa dönük olacak şekilde ayarlanmalıdır. Dışa dönüklük açısı, en son alçıda elde edilen dış rotasyon açısıyla eşleşmelidir. Örneğin, doktorunuz etkilenen ayağı ancak 50 dereceye kadar düzelterbilmişse, atel de 50 dereceye ayarlanmalıdır. *Siyah döner kolun ortasında bulunan altıgen başlı vidaları gevşetin ve siyah siyah döner kolun üzerinde bulunan işaret, kırmızı "Y" parçasının üzerindeki doğru açı derecesiyle aynı hizaya gelinceye kadar kırmızı "Y" parçasını dışa doğru çevirin. İstenen dışa dönüklük derecesi elde edilince ateli sabitlemek için vidayı tekrar sıkın.*

Ayak plakasının ayakkabılara/Bilek-Ayak Ortezine (AFO) takılması:

Siyah ayak plakasını Markell ayakkabıların/AFO'nun altına takmak için, siyah ayak plakasındaki iki gömme başlı vida deliğini ayakkabıların altındaki iki delik ile aynı hizaya getirin. Verilen standart başlı vidaları kullanarak önce

vidayı yarısına kadar sıkın, ardından diđer vidayı tamamen sıkın. Daha sonra geri dönüp ilk vidayı sonuna kadar sıkın.

Hızlı ayırma özelliğinin kullanılması:

Ayak plakası ayakkabılara takıldıktan sonra, siyah ayak plakasını iki kırmızı klipse kaydırarak takın ve ayak plakasını öne kaydırarak yay pistonunu etkinleřtirin ve ayakkabıları yerine sabitleyin. Ayakkabıları serbest bırakmak için, yaylı pistonu çekerken aynı anda plakayı geriye, çocuğın topuğuna doğru itin.